



## Avental Cirúrgico Descarpack

### DESCRIÇÃO

O **Avental Cirúrgico Descarpack** foi desenvolvido para proteção dos profissionais de saúde, durante cirurgias em geral, é estéril e de uso único.

Confeccionado em nãotecido SMS 100% polipropileno, disponível na cor azul clara, nos modelos padrão e reforçado e nos tamanhos, G e EG, oferece barreira antibacteriana com ação hidro-repelente, sendo altamente resistente.

Acondicionado de forma a permitir que seja retirado do invólucro sem comprometer sua esterilidade.

O **Avental Cirúrgico Descarpack** possui abertura na parte traseira e fechamento tipo OPA realizado através de velcro no colarinho, 4 tiras no tronco e o **Avental Cirúrgico Reforçado Descarpack** conta com reforço nas mangas e corpo.

Acompanha cartão de transferência que auxilia o profissional de saúde no momento de vestir o **Avental Cirúrgico Descarpack** e toalha de mão na cor branca, utilizada para secagem das mãos, após a antissepsia.

O **Avental Cirúrgico Descarpack** possui de aprovação (C.A)

## PRODUTO



**Cadastro ANVISA Avental Cirúrgico Padrão Descarpack:** 10330660222

**C.A:** 42.581

**Fabricante:** Shanghai Medplus Medical Supply CO., Ltd

**Cadastro ANVISA Avental Cirúrgico Reforçado Descarpack:** 10330660221

**C.A:** 42.352

**Fabricante:** Shanghai Medplus Medical Supply CO., Ltd

## INDICAÇÃO DE USO

O **Avental Cirúrgico Descarpack** Foi especialmente desenvolvido para utilização de profissionais da saúde durante processos cirúrgicos, como barreira de proteção contra a contaminação.

## MODELOS DISPONÍVEIS

O **Avental Cirúrgico Descarpack** é disponível nos modelos padrão e reforçado e nos tamanhos G e EG.

## COMPOSIÇÃO

### Avental Cirúrgico Padrão Descarpack

- **Avental:** Polipropileno;
- **Punho de Malha:** Algodão e Poliéster;
- **Cartão de Transferência:** Papel Cartão;
- **Toalha de Mão:** Celulose e Poliéster;

## Avental Cirúrgico Reforçado Descarpack

- **Avental:** Polipropileno;
- **Punho de Malha:** Algodão e Poliéster;
- **Parte Reforçada:** Polietileno e Polipropileno;
- **Cartão de Transferência:** Papel Cartão;
- **Toalha de Mão:** Celulose e Poliéster;

### VALIDADE

05 (cinco) anos após data de fabricação.

### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Modelo	Código	Quant. por Pacote	Quant. Caixa Master
Padrão G	0230101	1 unidade	50 unidades
Padrão EG	0230201	1 unidade	50 unidades
Reforçado G	0231101	1 unidade	50 unidades
Reforçado EG	0231201	1 unidade	50 unidades

### INSTRUÇÕES DE USO

1. Após a realização da antissepsia, o profissional de enfermagem ou circulante da sala deverá realizar a abertura do invólucro e entregar a toalha de mão para que o profissional de saúde realize a secagem das mãos;
2. Localizar o colarinho do avental e levantá-lo com as duas mãos para então sacudir o avental a fim de que as dobraduras se desfaçam, tendo o cuidado de não o esbarrar em superfícies não estéreis ou em pessoas da sala;
3. Localizar a entrada das mangas, sacudir gentilmente o avental e então o profissional de saúde deverá rapidamente estender as mãos nas mangas e esticar os braços para fora. O profissional de enfermagem ou circulante da sala deverá ajustar as tiras e então o profissional de saúde irá estender as mãos até o punho do avental;

4. Colocar-se de costas para o circulante, para que este feche o velcro do colarinho e amarre as tiras do avental na lateral;
5. O Avental Cirúrgico Reforçado deve ser vestido na sala de cirurgia, em área ampla. Caso o avental entre em contato em materiais não estéreis, o mesmo deve ser substituído;

## **ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES**

---

- Produto de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Esterilizado por Óxido de Etileno;
- Destruir após o uso;
- Proteger este produto do calor, umidade e da luz;
- O conteúdo da embalagem, como qualquer outro tecido ou material descartável, pode queimar se expostos a chama ou materiais extremamente quentes. Evitar o contato com qualquer chama ou fontes intensas de calor;

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.