



## Escalpe Descartável Descarpac

### DESCRIÇÃO

Os **Escalpes Descartáveis Descarpac** são constituídos por um tubo translúcido com 30 cm de comprimento e uma agulha com bisel trifacetado e asas (dispositivo para auxílio à venopuntura) em PVC colorido que identifica seu calibre. Possui ainda um conector fêmea tipo Luer 6% fabricado em ABS.

### PRODUTO



**Cadastro Anvisa:** 10330660220

**Fabricante:** Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd

### INDICAÇÃO DE USO

Os **Escalpes Descartáveis Descarpac** são desenvolvidos para a administração de fluidos ou injeções intravenosas de pequeno volume, além de serem utilizados em coletas de sangue periférico.

## TAMANHOS DISPONÍVEIS

Os **Escalpes Descartáveis Descarpack** são disponibilizados nos calibres:

Calibre	Cor
19 G	Creme
21 G	Verde
23 G	Azul
25 G	Laranja
27 G	Cinza

## COMPOSIÇÃO

- **Tubo:** Cloreto de Polivinila (PVC);
- **Agulha:** Aço inoxidável 304;
- **Asa:** Cloreto de Polivinila (PVC) com cores que identificam o calibre;
- **Protetor de Agulha:** Polietileno (PE);
- **Conector Fêmea tipo luer 6%:** Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) por ser mais resistente.

## VALIDADE

Cinco (05) anos após data de esterilização.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
19G	0421101	100 unidades	30 cartuchos
21G	0421201	100 unidades	30 cartuchos

23G	0421301	100 unidades	30 cartuchos
25G	0421401	100 unidades	30 cartuchos
27G	0421501	100 unidades	30 cartuchos

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Lavar e secar as mãos;
2. Calçar as luvas de procedimento;
3. Abrir a embalagem do produto corretamente, a fim de evitar o risco de contaminação;
4. Conectar o conector luer fêmea do Escalpe Descartável Descarpac no dispositivo de infusão/coleta de tamanho apropriado;
5. Garrotear o membro escolhido de 15 a 20 cm acima do local da inserção do escalpe;
6. Realizar a anti-sepsia do local;
7. Posicionar o bisel em um ângulo de 45 graus, e após penetrar a pele, diminuir o ângulo e progredir em direção à veia, diminuindo a angulação até a agulha fique paralela à pele. Introduzir completamente a agulha e observar a presença do retorno venoso;
8. Utilizar uma das mãos para fixar a posição do escalpe;
9. Soltar o garrote após inserção da agulha na veia;
10. Descartar o produto em local apropriado após o uso;
11. Aplicar curativo adesivo no local da punção.

## ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- Produto Estéril;
- Não utilizar se a embalagem estiver violada;
- Produto Médico Hospitalar de Uso Único;
- Proibido reprocessar;
- Esterilizadas por Óxido de Etileno;

- Esterilidade assegurada por 05 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada;
- Descartar em local apropriado após o uso.

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.