



Luva Nitrílica Powder Free Descarpack

DESCRIÇÃO

As **Lovas Nitrílicas Powder Free Descarpack** são consideradas equipamentos para proteção individual (EPI), não estéreis, de uso único, sem pó e livres de látex, podendo ser utilizadas por pessoas que possuem alergia ao látex e ao pó. Disponíveis na cor azul, promovem a proteção dos profissionais da área da saúde e do meio ambiente, por formarem uma barreira física, reduzindo assim os riscos de contaminações provocados por sangue e outros materiais biológicos com fluídos corporais.

Fabricadas de modo a oferecer maior resistência e reduzir a fadiga, as **Lovas Nitrílicas Powder Free Descarpack** possuem certificado de aprovação (C.A) pelo Ministério do Trabalho.

PRODUTO



Cadastro Anvisa: 10330669122
C.A: 31.410
Fabricante: Careglove Global SDN. BHD.

Cadastro Anvisa: 10330660278
C.A: 44.049
Fabricante: Hartalega SDN. BHD.

Cadastro Anvisa: 10330660284
C.A: 44.052
Fabricante: Top Glove Sdn Bhd.

Cadastro Anvisa: 10330660267
C.A: 43.653
Fabricante: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

INDICAÇÃO DE USO

As **Luvas Nitrílicas Powder Free Descarpack** foram desenvolvidas para proteção do profissional de saúde em procedimentos não estéreis e não invasivos.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

As **Luvas Nitrílicas Powder Free Descarpack** estão disponíveis na cor azul e nos seguintes tamanhos:

Tamanho	Comprimento Mínimo	Largura
PP	220 mm	≤ 80 mm
P	220 mm	80 ± 10 mm
M	230 mm	95 ± 10 mm
G	230 mm	110 ± 10 mm

COMPOSIÇÃO

- **Luva:** Copolímero de Butadieno e Acrilonitrilo.

VALIDADE

Cadastros na Anvisa 10330669122 e 10330660278: Três (03) anos após data de fabricação.

Cadastros na Anvisa 10330660284 e 10330660267: Cinco (05) anos após data de fabricação

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Quant. Cartucho	Quant. Caixa Máster
PP	0433101	100 unidades	20 cartuchos
P	0433201	100 unidades	20 cartuchos
M	0433301	100 unidades	20 cartuchos
G	0433401	100 unidades	20 cartuchos

INSTRUÇÕES DE USO

- Retirar todos os objetos das mãos, como anéis, pulseiras e relógios;
- Lavar, secar as mãos e proceder com a antissepsia das mesmas;
- Escolher a luva compatível com o tamanho das mãos;
- Calçar as luvas;
- Descartar em local apropriado após o uso;
- Higienizar as mãos;

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- Livre de Látex;
- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Lave sempre as mãos antes e depois de entrar em contato com pacientes e materiais contaminados;
- Produto médico hospitalar de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Descartar em local apropriado após o uso;
- Não estéril.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.