



# Luva para Procedimentos Não Cirúrgico Descarpack

## DESCRIÇÃO

As **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Descarpack** são consideradas equipamentos para proteção individual (EPI.), não estéreis, lubrificadas com pó bioabsorvível e de uso único.

Promovem a proteção dos profissionais da área da saúde e do meio ambiente, por formarem uma barreira física, reduzindo assim os riscos de contaminações provocados por sangue e outros materiais biológicos com fluídos corporais.

Fabricadas de modo a oferecer maior resistência e reduzir a fadiga, as **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Descarpack** são certificadas pelo INMETRO e Ministério do Trabalho (C.A).

## PRODUTO



**Notificação Anvisa:** 10330669104  
**C.A:** 29.996  
**Fabricante:** Careglove Global SDN. BHD.

**Notificação Anvisa:** 10330660304  
**C.A:** 44.157  
**Fabricante:** TG Medical SDN. BHD.

**Notificação ANVISA:** 10330660340  
**CA:** 47.835  
**Fabricante:** Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

**Notificação ANVISA:** 10330660176  
**CA:** 36.403  
**Fabricante:** Hartalega SDN. BHD.

## INDICAÇÃO DE USO

As **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Descarpack** foram desenvolvidas para proteção do profissional de saúde em procedimentos não estéreis e não invasivos.

## TAMANHOS DISPONÍVEIS

As **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Descarpack** estão disponíveis nos seguintes tamanhos:

Tamanho	Comprimento Mínimo	Largura
PP	220 mm	≤ 80
P	220 mm	80 ± 10 mm
M	230 mm	95 ± 10 mm
G	230 mm	110 ± 10 mm

## COMPOSIÇÃO

- **Luva:** 100% borracha de látex natural;
- **Pó Bioabsorvível:** Amido de milho;

## VALIDADE

Cinco (05) anos após data de fabricação.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
PP	0530101	100 unidades	20 cartuchos
P	0530201	100 unidades	20 cartuchos
M	0530301	100 unidades	20 cartuchos
G	0530401	100 unidades	20 cartuchos

## **INSTRUÇÕES DE USO**

---

1. Retirar todos os objetos das mãos, como anéis, pulseiras e relógios;
2. Lavar, secar as mãos e proceder com a antissepsia das mesmas;
3. Escolher a luva compatível com o tamanho das mãos;
4. Calçar as luvas;
5. Descartar em local apropriado após o uso;
6. Higienizar as mãos;

## **ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES**

---

- Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Lave sempre as mãos antes e depois de entrar em contato com pacientes e materiais contaminados;
- Produto médico hospitalar de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Descartar em local apropriado após o uso;
- Não estéril.

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.