



CATÁLOGO
ANATÔMICO
2023



EMBALAGEM - 1 UNI 22 kg
C: 95 cm - **L:** 34 cm - **A:** 58 cm



4D-463



Modelo de Punção Lombar

O modelo anatômico 4D-463 foi projetado para proporcionar uma observação detalhada da anatomia vertebral lombar, permitindo a exposição das regiões L1 e L2 para uma visualização aprimorada. Para a prática de punção lombar, as áreas funcionais indicadas são os processos espinhosos de L3-L5 e o sacrocóccix, sendo que marcadores distintos nessas regiões foram estrategicamente posicionados para facilitar o treinamento em técnicas como anestesia lombar, anestesia epidural e anestesia caudal. Além disto, é possível a prática de punção para aspiração de líquido.

Durante a prática, o espaço subaracnoide no intraespinal deve ser preenchido com um líquido transparente simulando o líquido cefalorraquidiano. A administração desse líquido pode ser efetuada por meio da injeção de cerca 20 ml através do tubo ou do acessório que acompanha o dispositivo como bolsas de infusão e tubos de conexão.

A técnica de punção lombar é preferencialmente treinada entre os processos espinhosos de L3 e L4. O ponto de inserção pode ser identificado pelo pico do processo espinhoso da crista de L4. Ao introduzir a agulha no processo espinhoso lombar ou inseri-la verticalmente na parte externa, é possível perceber uma sensação de resistência, indicando o bloqueio. A perfuração do ligamento amarelo resultará em uma sensação de vazio, indicando a inserção bem-sucedida da agulha no espaço subaracnoideo intraespinal. A confirmação adicional de sucesso na punção lombar é dada pela saída de líquido simulado após a punção.

Este modelo, portanto, oferece uma plataforma abrangente para o aprimoramento das habilidades práticas relacionadas à punção lombar, com características anatômicas detalhadas e a capacidade de simular diversas condições clínicas.





Perfil da Companhia

O compromisso da 4D Anatomy é atender seus clientes com eficiência e prestatividade, oferecendo-lhes produtos de alta qualidade a preços justos.

Esperamos que possam ter uma ótima experiência com os nossos produtos! Estamos à disposição para dúvidas e para acolher sugestões com o intuito de podermos melhor atender a você e a todos os nossos clientes.

OBRIGADO!



Contatos

Telefone: +55 (16) 4042-4000

Whatsapp: +55 (16) 4042-4000

Email: sac@4danatomy.com.br



Obs: Tanto as dimensões de caixa master, embalagem individual e seus respectivos pesos, são aproximadas, podendo ser alteradas sem aviso prévio.