

## Avental Cirúrgico Padrão Descarpack CA 42.581



### Características Técnicas do EPI

- Avental confeccionado em não tecido 100% polipropileno;
- Estéril;
- Hidrorrepelente;
- Equipamento de Proteção Individual – EPI – tipo avental, com proteção do tronco e membros superiores;
- Azul;
- Punho em malha;
- Acompanha toalha de mão;
- Abertura na parte dorsal;
- Fechamento em OPA e com velcro no pescoço e tiras na cintura;
- Cartão TAG de transferência;
- Avental tipo (PB) “6” - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007;
- Notificação Anvisa: 10330660222;
- CA: 42.581.

### Matéria-Prima da Fabricação

- Avental: Polipropileno;
- Punho de Malha: Algodão e Poliéster;
- Cartão de Transferência: Papel Cartão;
- Toalha de Mão: Celulose e Poliéster.

### Tamanhos Disponíveis

- G;
- EG.

### Indicação de Proteção

O Avental Cirúrgico Padrão Descarpack protege o usuário contra agentes químicos.

### Instruções de Uso

- Após a realização da antissepsia, o profissional de enfermagem ou circulante da sala deverá realizar a abertura do invólucro e entregar a toalha de mão para que o profissional de saúde realize a secagem das mãos;
- O Avental Cirúrgico Padrão deve ser vestido na sala de cirurgia, em uma área ampla;
- Caso o avental entre em contato com materiais não estéreis, este deve ser descartado ou substituído;
- Localizar o colarinho do avental e levantá-lo com as duas mãos para então sacudir o avental a fim de que as dobraduras se desfaçam, tendo o cuidado de não o esbarrar em superfícies não estéreis ou em pessoas da sala;
- Localizar a entrada das mangas, sacudir gentilmente o avental e então o profissional de saúde deverá rapidamente estender as mãos nas mangas e esticar os braços para fora. O profissional de enfermagem ou circulante da sala deverá ajustar as tiras e então o profissional de saúde irá estender as mãos até o punho do avental;
- Colocar-se de costas para o circulante, para que este feche o velcro do colarinho e amarre as tiras do avental na lateral;
- Para retirada do avental o Cirurgião deve liberar primeiramente o velcro do pescoço, e depois as tiras da cintura. Na sequência removê-lo e descartar em local adequado.

### Instruções de Armazenamento e Transporte

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4°C a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras e dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

### Condições de Manipulação, Limpeza e Higienização

Não são informados métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de uso único.

### Instruções de Manutenção

Não são informados métodos de manutenção pois o produto é de uso único e deve ser descartado após a utilização.

### Restrições e Limitações do EPI

• Este produto não é indicado para uso contra agrotóxicos.

### Prazo de Validade

Cinco (05) anos após data de esterilização

### Proteção em Eletricidade

Não há – Avental Cirúrgico sem isolamento elétrico.

### Substâncias Alergênicas ou Prejudiciais à Saúde

Avental Cirúrgico confeccionado em polipropileno, podendo causar reações alérgicas à usuários sensíveis. Neste caso suspender o uso imediatamente.

### Incompatibilidades

Não há.

### Possibilidade Alterações no EPI

Os Aventais Cirúrgicos Padrão perderão suas características de proteção caso as condições de uso estabelecidas neste manual de instruções não forem respeitadas.

### Local das Marcações Exigidas

Na etiqueta.

### Recomendações

- Seguir corretamente as instruções de uso;
- Utilizar o Avental Cirúrgico Padrão no tamanho correto;
- Não utilizar caso a embalagem esteja aberta ou violada;
- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Observar data de validade da esterilização antes de utilizar o produto;
- Caso o avental entre em contato com materiais não estéreis, este deve ser descartado e substituído por outro avental estéril.


### Advertências e Precauções

- O Avental Cirúrgico deve ser vestido na sala de cirurgia, em uma área ampla;
- Inspeccionar a existência de defeitos ou imperfeição antes da utilização;

- Uso em procedimentos cirúrgicos;
- O Avental Cirúrgico Padrão oferece proteção do tronco e membros superiores;
- Caso rasque, o Avental Cirúrgico Padrão deve ser descartado e substituído imediatamente;
- Utilizar aventais cirúrgicos do tamanho correto;
- Proteger este produto do calor, luz e umidade;
- Ao manusear utilize técnicas assépticas;
- Produto esterilizado por Óxido de Etileno;
- Evitar contato com qualquer chama ou fontes intensas de calor.

### Ensaio dos requisitos de desempenho:

Verificação dos requisitos de desempenho estabelecido para o material da vestimenta do Tipo PB (6) conforme a ISO 16602:2007 + A1:2012.

Ensaio Especificação		Nível de desempenho obtido	Classificação*	
Penetração a líquidos	Ácido sulfúrico 30%	Nível 3	 ISO 16.602 - Tipo (PB) 6	
	Hidróxido de sódio 10%	Nível 3		
	Butanol	Nível 0		
	o-Xileno	Nível 0		
Repelência a líquidos	Ácido sulfúrico 30%	Nível 3		
	Hidróxido de sódio 10%	Nível 2		
	Butanol	Nível 0		
	o-Xileno	Nível 0		
Resistência à tração		Nível 1		
Resistência ao rasgamento trapezoidal		Nível 2		
Resistência à perfuração		Nível 1		
Força de estouro		Nível 3		
Resistência à abrasão		Nível 2		
Resistência à flexão		Nível 6		

**Fabricante Responsável**

Shanghai Medplus Medical Supply Co., Ltd.

**Unidade Importadora I**

Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda  
Rua Doutor Leoberto Leal, 1150 – Centro - Ilhota – SC  
CEP 88320-000  
CNPJ: 01.057.428/0002-14 / I.E. 255. 460.058

**Unidade Importadora II**

Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda  
Av. Coronel Cyrillo Neves, 1239 – G-8 – Santo Agostinho  
Manaus – AM - CEP: 69036-605  
CNPJ: 01.057.428/0003-03

**Matriz**

Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda.  
Av. Queiróz Filho, 1700, torre A, sala 305/306  
Vila Hamburguesa – São Paulo – SP - CEP: 05319-000  
CNPJ: 01.057.428/0001-33 / I.E. 114.644.360.113



55 (11) 3649.5555  
Descarpack.com.br



**DESCARPACK**  
Efficiency in Disposables